




Protocole chirurgical pour l'implant Universal
compatible Tapered Screw-Vent ®*



Ø Implant	Os de faible densité	Os dence
<p>3,7</p> 	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.4</p>	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.4 FORET CYLYNDRIQUE 3.4</p>
<p>4.1</p> 	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CYLYNDRIQUE 3.4 FORE CONIQUE 3.4/3.8</p>	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CYLYNDRIQUE 3.4 FORE CONIQUE 3.4/3.8 FORET CYLYNDRIQUE 3.8</p>
<p>4.7</p> 	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CYLYNDRIQUE 3.4 FORET CYLYNDRIQUE 3.8 FORET CONIQUE 3.8/4.4</p>	<p>FORET PILOTE FORET CYLINDRIQUE 2.3 FORET CYLINDRIQUE 2.8 FORET CYLYNDRIQUE 3.4 FORET CYLYNDRIQUE 3.8 FORET CONIQUE 3.8/4.4 FORET CYLYNDRIQUE 4.7</p> <p>*Marque déposée par la société Zimmer Dental Inc</p> <p>Contact I.G.A France : 7 Allée Maeva 13530 TRET 04 42 61 37 59 contact@implantsgeneriques.com www.implantsgeneriques.com</p>

