
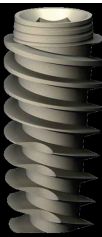



Protocole chirurgical pour l'implant

UNI ACT®*



Ø Implant	Os de faible densité	Os densité intermédiaire	Os dence
<p>3,5</p> 	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 TARAUD Ø 3.5 mm.</p>
<p>4,3</p> 	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6 TARAUD Ø 4.3</p>
<p>5,0</p> 	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6 FORET CONIQUE 3.8/4.2 FORET CONIQUE 4.2/4.6</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6 FORET CONIQUE 3.8/4.2 FORET CONIQUE 4.2/4.6</p> <p>Contact I.G.A France : 7 Allée Maeva 13530 TRET 04 42 61 37 59 con- tact@implantsgeneriques.com www.implantsgeneriques.com</p>	<p>FORET LANCE FORET CONIQUE 2.0 FORET CONIQUE 2.4/ 2.8 FORET CONIQUE 2.8/3.2 FORET CONIQUE 3.2/3.6 FORET CONIQUE 3.8/4.2 FORET CONIQUE 4.2/4.6 TARAUD Ø 5.0</p>

